



Návod k montáži a použití (1504938)

Obsah balení

3 Oční výplach 500 ml +uzávěr, 5 sterilních gázových tamponů 18×40 cm, 1 tužka na odstranění třísek, 6 sterilních očních kompresí, 1 balení papírových kapesníků 3 vrstvy po 10 kusech, 1 zrcátko 140x80x2 mm s lepidlem

Potřebné nástroje:

- Vrták s vrtákem vhodným pro daný typ zdi
- Šroubovák
- Vodováha
- Tužka
- Metr
- Šrouby a hmoždinky (součástí sady)

Montáž:

1. Vyjměte obsah z krabice.
2. Zkontrolujte, zda jsou přítomny všechny součásti: zrcátko, 3 lahvičky (500 ml, sol), šrouby a hmoždinky.
3. Vyberte snadno přístupný místo
v blízkosti rizikových oblastí.

Pro zajištění vodorovnosti použijte vodováhu.

4. Přiložte stanici ke zdi, označte otvory, sejměte ji a vyvrtejte otvory. Vložte hmoždinky.
5. Stanici znovu namontujte a upevněte šrouby.

Zkontrolujte stabilitu.

Použití:

- V případě nouze očí: otevřete stanici, vyjměte potřebnou lahvičku, rozbijte pečeť, použijte oční miskou k vypláchnutí oka.
- Po použití: zkontrolujte pomocí integrovaného zrcátka,
v případě potřeby vyhledejte lékaře.